

# medi SAK

Schulter-Abduktions-Kissen  
Shoulder abduction pillow  
Orthèse d'abduction de l'épaule  
Cojín para abducción del hombro

Gebrauchsanweisung. Instructions for use. Mode d'emploi. Instrucciones de uso.  
Instruções para aplicação. Istruzioni per l'uso. Gebruiksaanwijzing. Brugsvejledning.  
Bruksanvisning. Návod k použití. Uputa za uporabu. Инструкція по використанню.  
Kullanma kılavuzu. Instrukcja zakładania. Οδηγία εφαρμογής. Інструкція з використання.  
使用说明



1



2



3



4



5



6

# medi SAK

## Назначение

medi SAK представляет собой подушку для отведения плеча. Изделие необходимо применять исключительно для ортезного лечения плеча; оно предназначено только для использования при отсутствии повреждений на коже.

## Показания

- Синдром сдавления вращающей манжеты плеча
- Реконструкционные операции после повреждений вращающей манжеты плеча
- Состояние после имплантации протезов плечевой кости
- Синдром «замороженного плеча» после анестезии

## Противопоказания

- Плечевой артродез
- Задняя нестабильность плечевого сустава

## Рекомендации по применению

Отводящая шина для плеча универсального размера и может быть использована для правой или левой руки.

- Накачайте внутреннюю надувную подушку. Оберните ремень вокруг здорового плеча. Важно: для облегчения пользования изделием застежка-липучка должна находиться на внешней стороне ремня. Треугольник, к которому пришиты ремни, должен располагаться на спине (рис.1).
- Поместите надувную подушку под больную руку и прикрепите к ней плечевой ремень (рис. 2).
- Для того, чтобы рука лежала в физиологически выгодном

положении, к подушке с помощью застежек-липучек прикреплены стержень и кистевой мяч (А). В правильном положении подушки кисть легко ложится на мяч (В).

- Закрепите две ленты для предплечья, как показано на рисунке, при этом стержень ложится под застежки-липучки на внутренней стороне этих лент (С).
- Расположите подушку для плечевой кости так, чтобы верхняя конечность удобно лежала на ней, не касаясь туловища. Для больных с малыми размерами тела иногда приходится извлекать подушку из чехла и уменьшать ее размер (например, с помощью острого ножа). Важно: убедитесь в том, что при укладке верхней конечности на подушку головка плечевой кости не смещается вверх.
- Прикрепите ленту к подушке для плечевой кости: зафиксируйте застежку-липучку, обернув ее концы вокруг руки.
- Подтяните вверх передний ремень, идущий к подушке, при этом следите, чтобы он не был натянут слишком сильно (рис. 4).
- Высота расположения подушки регулируется с помощью застежек-липучек на концах ремней. Правильное с медицинской точки зрения положение подушки может быть достигнуто для всех размеров тела (рис. 5).
- На рис. 6 показано правильное положение шины для плеча medi SAK. Угол отведения можно уменьшить, выпустив часть воздуха из внутренней камеры. Тазовый ремень, который охватывает тело и крепится к подушке, дополнительно фиксирует шину к телу.
- В конце закройте клапан круглой крышкой с застежкой-липучкой.

**Важные замечания**

Изделие предназначено только для индивидуального использования. В случае использования изделия более чем одним пациентом гарантии производителя утрачивают силу. Если при пользовании изделием у Вас возникли боль или неприятные ощущения, пожалуйста, немедленно снимите его и проконсультируйтесь у Вашего врача. Не носите изделие при наличии открытых ран. Применяйте изделие только согласно рекомендации Вашего врача.

**Рекомендации по уходу**

После удаления надувной внутренней. Перед стиркой застегните застежки-липучки. Остатки мыла, кремы или мази могут вызвать раздражение кожи и износ материала.

- Стирайте наволочки, карманы и ремни предпочтительно с использованием моющего средства medi clean.
- Не отбеливать.
- Сушите на воздухе.
- Не гладьте.
- Не подвергать химической чистке.

**Инструкция по хранению**

Хранить в сухом месте, защищать от прямого попадания солнечных лучей.

**Материалы**

полиамид

**Гарантия**

в объемах, предусмотренных законодательством, действующим на территории страны-импортера.

**Утилизация**

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

**Ваша компания medi**

желает Вам скорейшего выздоровления!